

Scaricare dal sito http://www.tecmedical.it/cs_download.htm il file Driver_telecamera, salvarlo e scompattarlo in una cartella sul computer (non eseguirlo dal browser di navigazione Internet).

Disattivare temporaneamente software antivirus e firewall

Non collegate la telecamera al computer

Aprire la cartella "Driver_Telecamera" e lanciare il file "Setup.exe"

Appare la finestra di selezione della lingua relativa al programma di installazione (in alto a destra)




Posizionatevi con il mouse sopra l'immagine della telecamera che dovete installare e fate clic sul pulsante

“Esegui installazione”



Selezionate il paese (importante per il formato video)

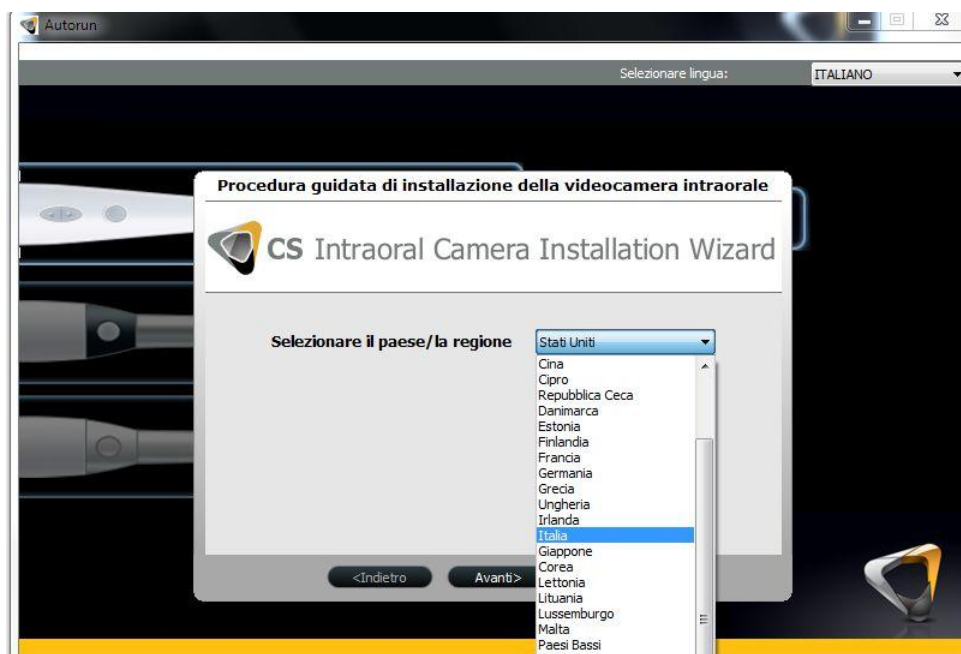


Inizia l'installazione del driver (il tempo di attesa dipende dalla velocità del computer), al termine appare la finestra in cui si chiede di collegare/accendere la telecamera, seguite le istruzioni a video


CS Intraoral Camera Installation Wizard



Attendete qualche secondo, comparirà il messaggio di Windows relativo al nuovo hardware, la telecamera si accende e dopo qualche secondo si attiva il pulsante "Avanti", clic per continuare l'installazione

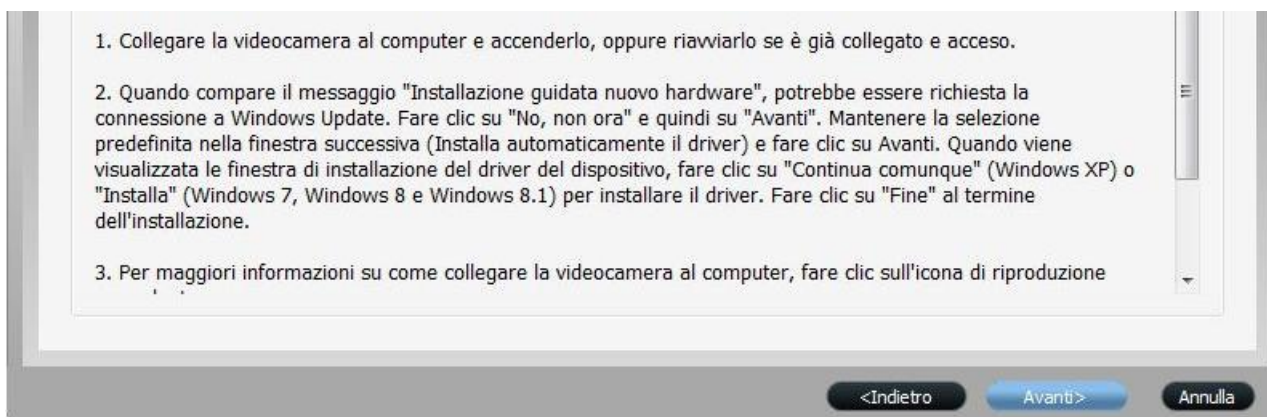

La procedura avvia un test per verificare che tutti i componenti siano configurati correttamente, alla fine del test fare clic su **“Avanti”**

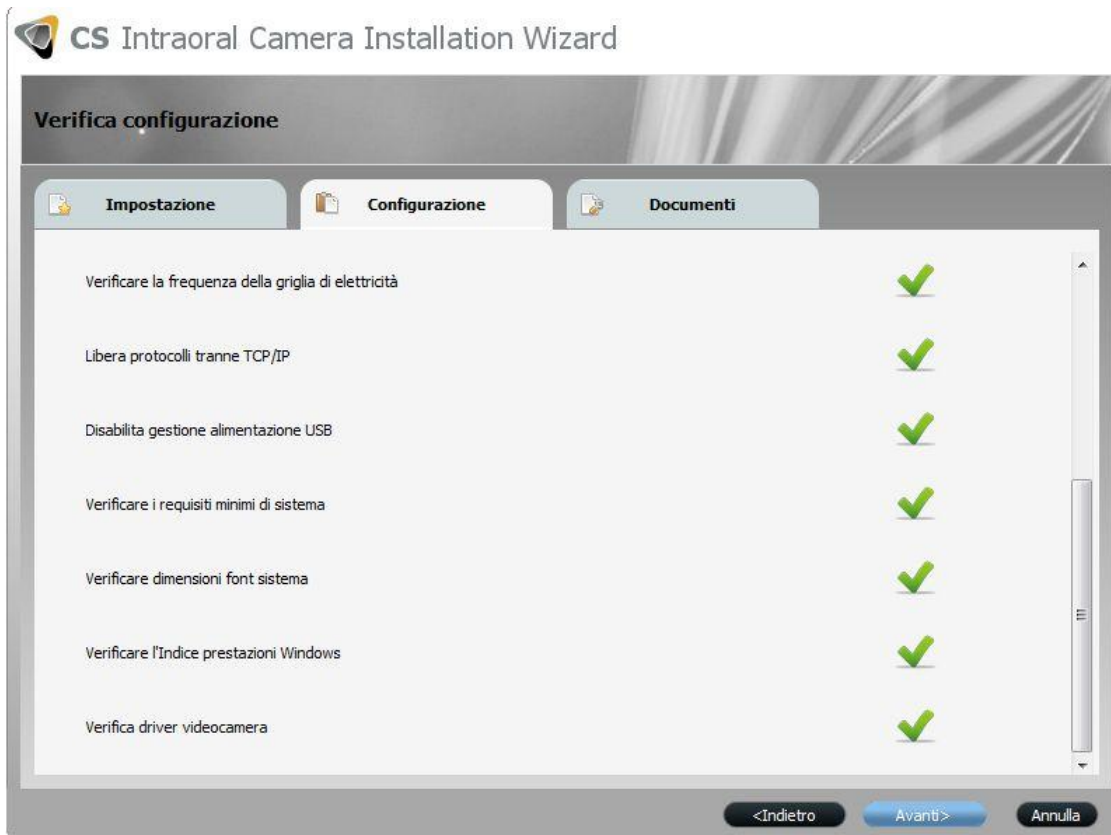

Fate clic su **“Fine”**

Riavviate il PC per completare l'installazione.

