


Per recuperare/spostare gli archivi del programma Carestream DisSuite è sufficiente copiare la cartella DB che si trova, se sono state mantenute le impostazioni di base, nel percorso

C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\CARESTREAM

e copiarla nel nuovo PC o nella nuova destinazione

Se la cartella **DB** non si trova nel percorso originale, potete cercarla nelle impostazioni del programma:

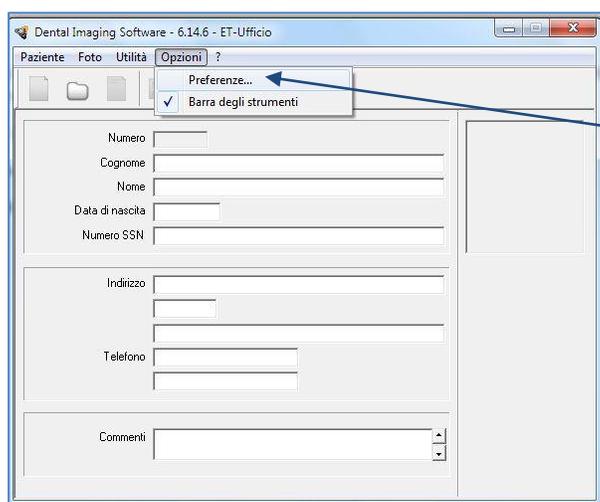

clic sul pulsante “Opzioni” e scegliere “Preferenze”

Nella finestra “File paziente” troverete il **percorso del database** e/o cambiarne il percorso.

