

Attivazione licenze Dental Imaging Software (DIS) e CS Imaging (fino a versione 7)

Accedere al sito

<https://cs-licensing.carestreamdental.com/>

Creare un account se non già disponibile inserendo l'indirizzo e-mail e selezionando

“Ho bisogno di creare un account”



italiano (Italia) ▼



Attivazione e Registrazione dei Prodotti

Accedi

Indirizzo e-mail: Ricorda il mio indirizzo e-mail su questo computer

Ho un account Single-Sign-On Carestream Dental

Password:

Ho bisogno di creare un account

[Continua](#)

Eseguendo l'accesso si accettano [Termini](#), [Politica sulla privacy](#) e [Informativa sui cookie](#) di Carestream Dental

Non si sa se si dispone di un account o sono stati dimenticati i dettagli? [Ottieni assistenza per l'account](#)

L'indirizzo e-mail è cambiato? Accedere utilizzando il vecchio indirizzo e-mail e modificare i dettagli di accesso.

Compilare i dati di accesso selezionando "Non ho nessuna di queste informazioni" nel campo "Possiamo aiutarti ad inserire i tuoi dettagli?"



Attivazione e Registrazione dei Prodotti - Crea record cliente

Questa pagina viene utilizzata per creare un account, registrare i tuoi dettagli e per registrare i prodotti Carestream Dental esistenti. Le voci obbligatorie sono contrassegnate con *

Dettagli di accesso

Compilare queste voci che verranno utilizzate per accedere all'Attivazione dei prodotti

Verrà creato un account Single-Sign-On (SSO) Carestream Dental che fornirà l'accesso ai servizi Carestream Dental [Altre informazioni](#)

Il mio indirizzo e-mail è*: Conferma indirizzo e-mail*:

Inserisci una password*: Conferma password*:

Possiamo aiutarti ad inserire i tuoi dettagli?

Se si dispone di una delle informazioni riportate in basso, possiamo compilare i tuoi dettagli.

- Ho una chiave di licenza che inizia con la lettera 'B'
- Conosco il mio numero account Carestream Dental [Dove posso trovare il mio numero account?](#)
- Non ho nessuna di queste informazioni

I tuoi dettagli

Nome azienda/organizzazione* Paese*

Titolo Nome* Secondo nome Cognome* Suffisso

Indirizzo*

City* Zip/Postal Code

Indirizzo e-mail di contatto* Numero di telefono principale* Altro numero di telefono & Tipo

La persona indicata sopra ha espresso il suo consenso esplicito per l'utilizzo di queste informazioni in conformità alle condizioni [Privacy](#), [Cookie](#) e [Condizioni di utilizzo](#) di questo sito*
per ricevere informazioni generali su prodotti e servizi tramite E-mail Telefono Pubblica

Non è obbligatorio in questa fase registrare il prodotto nel campo

"Dispositivo e software Carestream Dental (inclusi i marchi Kodak e Trophy) esistenti"

Dispositivo e software Carestream Dental (inclusi i marchi Kodak e Trophy) esistenti

Registrare tutti i prodotti che si posseggono già. I nuovi prodotti che si stanno attivando vengono inseriti in seguito.

Prodotto Numero di serie Acquistato da Acquistato in data


Registra prodotto

| Prodotto | Numero di serie | Acquistato da | Acquistato | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------|--|
| Nessun record da visualizzare | | | | |

Continuare


[Guida](#)

Una volta creato l'account fare il log-in e selezionare "Attiva Prodotto" -> "Attiva una licenza per un prodotto Carestream Dental"

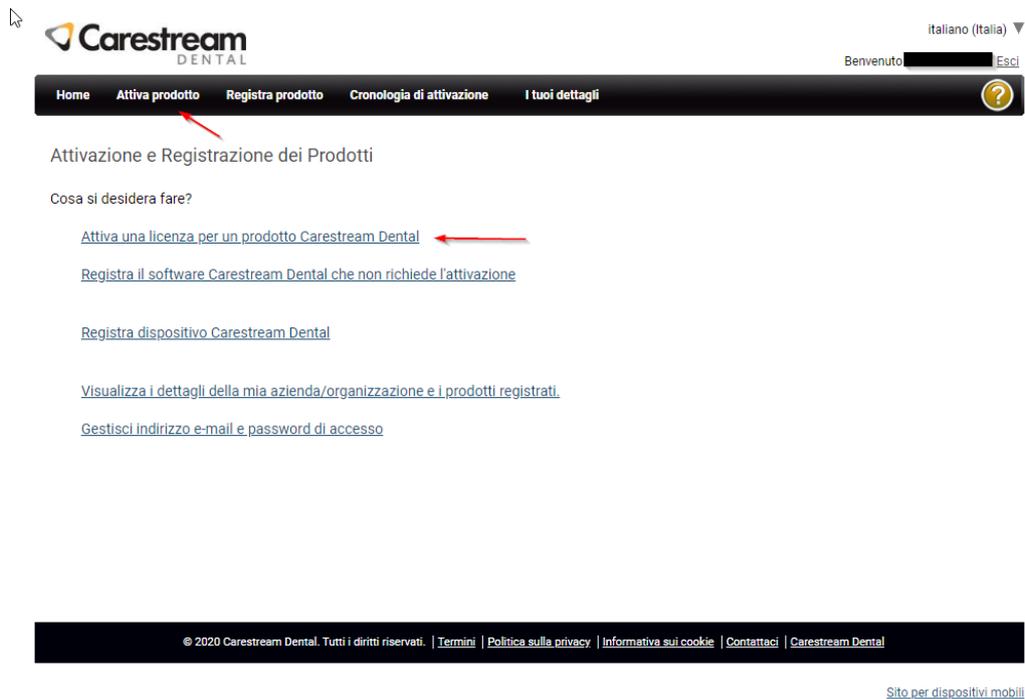

The screenshot shows the Carestream Dental website interface. At the top left is the Carestream DENTAL logo. On the right, there is a language selector set to 'italiano (Italia)' and a user greeting 'Benvenuto [redacted]' with an 'Esci' button. A navigation bar contains the following items: Home, Attiva prodotto (highlighted with a red arrow), Registra prodotto, Cronologia di attivazione, and I tuoi dettagli. Below the navigation bar, the page title is 'Attivazione e Registrazione dei Prodotti'. Underneath, it asks 'Cosa si desidera fare?' and lists several links: 'Attiva una licenza per un prodotto Carestream Dental' (highlighted with a red arrow), 'Registra il software Carestream Dental che non richiede l'attivazione', 'Registra dispositivo Carestream Dental', 'Visualizza i dettagli della mia azienda/organizzazione e i prodotti registrati', and 'Gestisci indirizzo e-mail e password di accesso'. At the bottom, there is a footer with copyright information and links to 'Termini', 'Politica sulla privacy', 'Informativa sui cookie', 'Contattaci', and 'Carestream Dental'. A link for 'Sito per dispositivi mobili' is also present.

Selezionare " Codice di licenza per il software di Kodak Dental Imaging Software o CS Imaging"

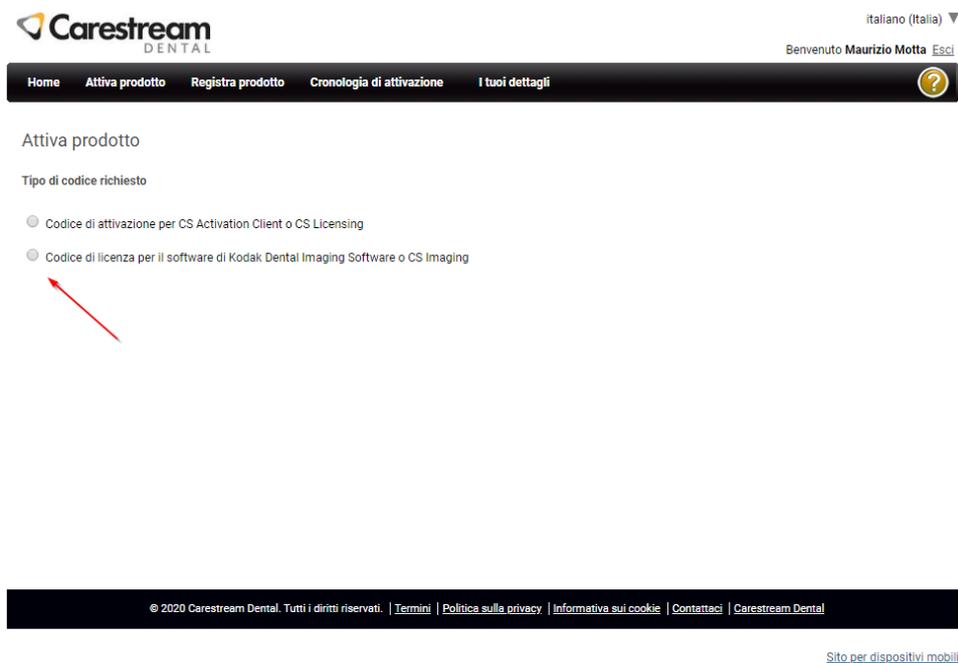

The screenshot shows the 'Attiva prodotto' page on the Carestream Dental website. The navigation bar is the same as in the previous screenshot, with 'Attiva prodotto' selected. The page title is 'Attiva prodotto'. Below it, there is a section titled 'Tipo di codice richiesto' with two radio button options: 'Codice di attivazione per CS Activation Client o CS Licensing' and 'Codice di licenza per il software di Kodak Dental Imaging Software o CS Imaging' (highlighted with a red arrow). At the bottom, there is a footer with copyright information and links to 'Termini', 'Politica sulla privacy', 'Informativa sui cookie', 'Contattaci', and 'Carestream Dental'. A link for 'Sito per dispositivi mobili' is also present.

Inserire il codice di licenza fornito dal software DIS o CS imaging per Generare il codice di Licenza

- Codice di licenza per il software di Kodak Dental Imaging Software o CS Imaging

Enter your License Key: [Genera codice di licenza](#)

Your License Code is: **106043** [Invia una email](#)